



Schnitzler Rettungsprodukte GmbH & Co. KG · Rudolf-Diesel-Str. 7 · DE-53859 Niederkassel

Telefon: +49 (0) 228 971 18 97

Telefax: +49 (0) 228 971 18 99

[info@schnitzler-rettungsprodukte.de](mailto:info@schnitzler-rettungsprodukte.de)

[www.schnitzler-rettungsprodukte.de](http://www.schnitzler-rettungsprodukte.de)



## Desinfektionsmittelempfehlung für Schnitzler Produkte

Für eine spezielle Desinfektion unserer Produkte dürfen nur handelsübliche Desinfektionsmittel gemäß den Vorgaben des jeweiligen Herstellers verwendet werden. Zudem möchten wir sie bitten etwaige Wechselwirkungen mit unterschiedlichen Desinfektionsmitteln zu beachten.

Von Desinfektionsmittel deren Inhaltsstoffe reines Wasserstoffperoxid enthalten, raten wir ab.

Die in der beigefügten Tabelle aufgeführten Desinfektionsmittel wurden als unbedenklich in Bezug auf unsere Artikel eingestuft. Hierzu wurden entsprechende Materialverträglichkeitstests durchgeführt.

Hersteller	Desinfektionsmittel	
<b>Schülke &amp; Mayr GmbH</b>	Mikrozid® universal wipes	
	Mikrozid® AF wipes	
	Schülke Wipes safe&easy	
	Schülke Wipes	
<b>Dr. Schumacher GmbH</b>	ULTRASOL OXY® WIPES	
	DESCOCEPT SENSITIVE WIPES	
<b>HARTMANN (BODE Chemie GmbH)</b>	Bacillo® 30 Sensitive Foam	
	Bacillo® 30 Sensitive Tissues	
	Dismozon plus	
	Mikrobac forte	
	Kohrsolin extra	
	Mikrobac tissues	
<b>Meditrade GmbH</b>	Medizid® Rapid+ XXL	
	Desinfektionstücher	