

SCHNITZLER

Rettungsprodukte GmbH & Co. KG



Gebrauchsanweisung

ROLLBOARDS und ROLBOARDTASCHEN






für alle Tragentypen



Rollboard, faltbar (Umlagerungssystem für liegende Patienten)

REF

Das Produkt ist nach § 139 SGB V unter der Nr.: 22.29.01.2062 in das GKV-Hilfsmittelverzeichnis aufgenommen.

Art.-Nr.	Art.-Nr.: (vormals)	Maße	Packmaß	Patientengewicht, empfohlen bis:	Farbe
RB-75-45-1/3-ECO	313-RB-ECO-1/3	75 x 45 cm	25 x 45 cm	200 kg	
RB-75-45-1/3-NYL	313-RB-NYL-1/3	75 x 45 cm	25 x 45 cm	200 kg	
RB-85-50-1/3-ECO	313-RBXL-ECO-1/3	80 x 50 cm	29 x 50 cm	200 kg	
RB-154-50-1/3-ECO	314-RB-ECO-1/3	154 x 50 cm	52 x 50 cm	200 kg	
RB-154-80-1/3-ECO	314-RBXL-ECO-1/3	154 x 80 cm	52 x 80 cm	200 kg	

REF

Aufbewahrungstaschen für Rollboards

Art.-Nr.	für Tragentyp	Befestigung	passend für Rollboards mit der Art.-Nr.
331	Stollenwerk	mittig, unter der Trage	RB-75-45-1/3-ECO RB-75-45-1/3-NYL RB-85-50-1/3-ECO
332	Stryker M1	mittig, unter der Trage	
333	Stryker Power Pro XT Kartsana Power Brava	unter dem Kopfteil der Trage	
334	Ferno Mondial	mittig, unter der Trage	

Technische Daten:

Material der Außenhülle: PES-Gewebe mit einseitiger, hochgleitfähiger PVC-Beschichtung
Inlay: Kunststoffplatte PE-HD extrudiert, 3 mm, schwarz, faltbar

Made in Germany - Ein Qualitätsprodukt aus dem Rheinland

Zweckbestimmung des Produkts:

Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Rollboard (optional mit Aufbewahrungstasche). Hersteller des Produkts ist die Firma Schnitzler Rettungsprodukte GmbH & Co. KG. Das Produkt wird als Umlagerungshilfe zum schonenden Umlagern von liegenden oder bettlägerigen Personen mit einem max. Gewicht von 200 kg eingesetzt. Das Produkt ist unter der Nr.: 22.29.01.2062 in das GKV-Hilfsmittelverzeichnis nach § 139 SGB V aufgenommen.

Das Umlagern erfolgt bedingt durch die Verarbeitung eines hochwertigen Gleitmaterials, selbst bei adipösen Patienten rückenschonend für das Rettungsdienst- und Pflegepersonal, selbst bei adipösen Patienten. Das Material ist hautfreundlich, leicht zu reinigen und zu desinfizieren. Das Rollboard ist faltbar und kann in Rollboardtaschen, die an der Trage befestigt werden, platzsparend untergebracht werden.

Für einen ordnungsgemäßen Gebrauch ist die vorliegende Gebrauchsanweisung zu beachten.

Zulässige Betriebsbedingungen:

- Die Betriebstemperatur wird auf -15°C bis +40°C festgelegt.
- Die Aufbewahrungstemperatur wird mit -30°C bis +40°C festgelegt
- Für die Lebensdauer werden 5 Jahre empfohlen

Reinigungs- und Desinfektionshinweise:

- Zur Reinigung kann die Außenhülle und das Inlay mit einer Seifenlösung gereinigt werden.
- Bei starken Verschmutzungen kann die Außenhülle in der Waschmaschine im Feinwaschgang bei max. 40°C gereinigt werden. Das Produkt danach an der Luft trocknen lassen.
- Für eine spezielle Desinfektion nur handelsübliche Desinfektionsmittel verwenden Vom Hersteller als unbedenklich eingestuft werden:
Dismozon plus, Bacillol 30, Kohrsolin extra, Mikrobac forte
- Kein Wasserstoffperoxid (H₂O₂) verwenden
- Desinfektionsmittel nur gemäß den Vorgaben des jeweiligen Herstellers verwenden, bei Überdosierung wird keine Haftung für Schäden am Material übernommen.
- Nach Beendigung des Reinigungs- und Wartungsvorgangs ist vor dem Wiedereinsatz des Produkts das Kunststoff-Inlay wieder in die Außenhülle einzulegen.

Dabei ist darauf zu achten, dass die blaue bzw. schwarze Seite der Außenhülle sichtbar ist.



Wartungshinweise:

- Bei erkennbaren Beschädigungen des Rollboards darf diese nicht weiterverwendet werden.** Vor einem weiteren Einsatz muss diese instandgesetzt werden.
- Die Oberfläche und die Gleitfläche des Rollboards darf nicht durch spitze oder scharfkantige Gegenstände beschädigt werden.
- Zur Behebung von Schäden bieten wir einen eigenen Reparaturservice in unserem Betrieb an. Dazu muss das Rollboard zur ordnungsgemäßen Instandsetzung, im desinfizierten Zustand, zu uns gesendet werden.
- Das Produkt ist zum Wiedereinsatz geeignet. Nach Beendigung eines Einsatzes ist das Produkt zu pflegen (siehe Abschnitt Reinigungs- und Desinfektionshinweise) und auf äußerlich erkennbare Schäden zu kontrollieren.

Bestehende Anwendungsrisiken und Kontraindikationen:

Es sind keine bestehenden Anwendungsrisiken oder Kontraindikationen bei Einhaltung der Hinweise aus der Gebrauchsanweisung bekannt.

Zulässige Einsatzorte:

Das Produkt kann im Rettungsdienst, in Krankenhäusern, Seniorenpflegeeinrichtungen und in der häuslichen Pflege eingesetzt werden.



Anwendungshinweise

Rollboard, faltbar

(Umlagerungssystem für liegende Patienten)



- Rollboard aus Rollboardtasche entnehmen
- Rollboard aufklappen




- Patient aus Seitenlage auf Rollboard auflegen
- Patient sanft in Richtung der gewünschten neuen Liegeposition (z.B. auf Behandlungstisch oder Bett) schieben oder ziehen.
- Patient in Seitenlage bringen und das Rollboard entfernen

Aufbewahrungstaschen



Art.-Nr.: 334

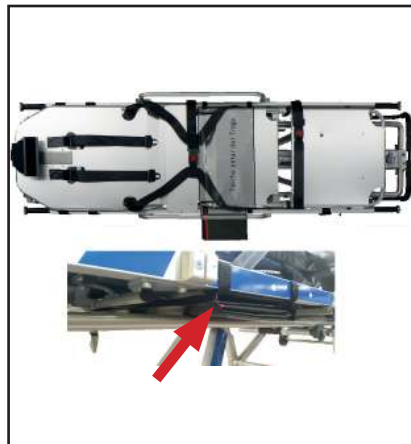

Art.-Nr.: 331



Art.-Nr.: 332

- Aufbewahrungstasche unter der Trage, wie dargestellt, befestigen
- Rollboard zusammenfalten und in Tasche einschieben



Art.-Nr.: 333 auf Stryker



Art.-Nr.: 333 auf Kartsana

- Aufbewahrungstasche am Kopfende der Trage, wie dargestellt, befestigen
- Rollboard zusammenfalten und in Tasche einschieben